

5-2. 配送方針の変更とお願い

- 2021年2月より日本郵便の新型コロナPCR検査検体の配送方針が変更になりました。日本郵便が求める「3重包装基準」への対応のため、大変お手数をおかけいたしますが、下記対応をお願い致します。

① 検体送付時：UNマークの送付段ボール箱への貼付

検査ID送付時に印刷データをお送りしますので、A4サイズで印刷・マーク切り取りの上、段ボール箱にしっかりと貼付ください。

※送付伝票の商品名は「**コロナ検体（不活化済）**」となります。

※**コンビニエンスストア、ゆうパック取扱所での取り扱い不可**のため、お近くの郵便局や集荷での配送をお願い致します。

※段ボール箱以外（封筒やレターパックなど）では配送できません。



② 検体採取時：各受検者へのティッシュ同梱のお願い

吸水用のティッシュペーパー1枚を折りたたんで検体梱包時、採取容器と共に1次袋の中に入れてください。

※**吸水材が入ったキットを受け取られた場合は、吸水材を説明書に従って入れてください。**

ティッシュペーパー1枚を8つ折りにして1次袋の中に採取容器と一緒に入れてください。

※採取容器には巻き付けないでください



R ※空輸でのゆうパックの配送は受付いただけませんのでご注意ください。

※日本郵便のリリース文：https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0118_01.html (1/18発表)